



NAVODILA ZA UPORABO

Alkotest za enkratno uporabo ACE

Kataloška št.: 14 62 837



Kazalo

Napotki za uporabo	2
Analiza testa	3
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki	3
Garancijski list	5

Napotki za uporabo

Po uživanju alkohola ali drugih substanc (ustno razpršilo, zdravila itd.) počakajte 10 minut in šele nato preverite trenutno vsebnost alkohola v krvi.

Maksimalna raven alkohola v krvi je dosežena približno eno uro po zaužitju zadnje alkoholne pijače.



Vzemite testno cevko iz balona v smeri puščice.



Oba konca potisnite skupaj karseda daleč.



Napolnite balon z izdihanim zrakom s konstantnim zračnim tokom in brez prekinitve.



Testno cevko nataknete na ustnik balona. V pribl. 15 sekundah iztisnite zrak iz balona.



Vzemite testno cevko v roke in jo tako dolgo držite v roki, kot označuje barva v okvirčku pod točko 6 v originalnih navodilih za uporabo, ki so natisnjena na balonu. Bela: 1 minuta; rdeča: 3 minute.

Analiza testa

Odprite roko in takoj ocenite obarvanje reagenta.

- Rdeča barva: Vsebnost alkohola je višja ali enaka 0,25 mg/L izdihanega zraka, kar se sklada z vrednostjo 0,5 promila v krvi. **STE NESPOSOBNI ZA VOŽNJO.**

- Brez rdeče barve: Vsebnost alkohola je nižja od 0,5 promila.



Tehnični podatki

Temperatura pri delovanju: 10 °C do 40 °C

Temperatura pri shranjevanju: -20 °C do 70 °C

Varnostni napotki

Testno cevko vedno shranjujte izven dosega otrok in živali.

Ne vdihujte ali pogoltnite.

Po zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč ali pa pokličite telefonsko številko za nujne primere 112.

Preprečite stik s kožo, očmi in oblačili.

Testne cevke med testiranjem ne usmerjajte proti drugi osebi.

V primeru stika reagenta z očmi ali kožo takoj izperite z veliko količino vode.

Testno cevko po uporabi ne shranite, temveč jo odvrzite med gospodinjske odpadke.

Prepričajte se, da rok uporabe ni prekoračen.

Ta alkotest lahko uporabite samo enkrat.

Rezultata alkotesta za enkratno uporabo pri uradni kontroli ni možno uporabiti kot dokazno sredstvo! Vaše osebne odločitve, ki temeljijo na tem rezultatu testiranja, so izključna odgovornost vas kot uporabnika testa, zato proizvajalec ali njegov zastopnik ne moreta prevzeti nikakršne odgovornosti.

Kemični alkotesti, kot je ta testna cevka, prikazujejo ocenjeno vsebnost alkohola, vendar pa ne gre za merilne naprave!

V primeru nepravilne uporabe, ki ni v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo, ter neupoštevanja previdnostnih ukrepov, tako proizvajalec kot tudi trgovec ne prevzemata nobene odgovornosti.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2018 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Alkotest za enkratno uporabo ACE**
Kat. št.: **14 62 837**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.